



מס' 8			
מתאריך: 8/2015		מרחבים נגב ולכיש	
עמוד מס' 1 מתוך 1 עמודים		שם : הודעות שגיאה בגלוקומטר מסוג <i>optium freestyle</i> - תזכורת	

הודעות שגיאה אפשריות במד סוכר מסוג Optium Free Style

שלום רב,



במהלך השימוש במד הסוכר מהסוג הנ"ל, ייתכן ותופענה הודעות שגיאה אשר יצביעו לכאורה על תקלת מכשיר ובפועל הן מעידות על היפו או היפר גליקמיה.

לנוכח זאת ולאחר בירורים אל מול הגורמים הרלבנטיים, אבקש לציין את הדגשים הר"מ:

התקלה המופיעה על צג המכשיר	האפשרויות	הפעולות שיש לבצע
E-3	רמת הסוכר בדם נמוכה מאוד או שישנה בעיה עם הסטיק.	בצע שוב בדיקת רמת סוכר עם סטיק חדש עם כמות דם מספקת. במידה ואותה תקלה ממשיכה להופיע על הצג <u>והקליניקה אותה מציג המטופל תואמת למצב היפוגליקמיה</u> , יש לטפל בהיפוגליקמיה.
E-4	רמת הסוכר בדם גבוהה מאוד או שישנה בעיה עם הסטיק.	בצע שוב בדיקת רמת סוכר עם סטיק חדש עם כמות דם מספקת. במידה ואותה תקלה ממשיכה להופיע על הצג <u>והקליניקה אותה מציג המטופל תואמת למצב היפרגליקמיה</u> , יש לטפל בהיפרגליקמיה.

במקרים בהם בבית המטופל ישנו גלוקומטר, ניתן וכדאי לבצע בדיקה נוספת במכשירו, להצליב את נתוני הבדיקה ולחזק את האבחנה.

שפיר בוסנר, מג"ר
מפקח אגף הרפואה
במרחבים נגב ולכיש

"לאלה שיש את הזכות לדעת, יש את החובה לפעול....." (אלברט איינשטיין)