



מס' 4	הנחיית קרא וחתום
מתאריך: 3/2013	מרחבים נגב ולכיש
עמוד מס' 1 מתוך 1 עמודים	שם : חיבור CPAP למערכת החמצן - חידוד

פאראמדיקים שלום של רב,

☒ אבקש לחדד שוב את נושא חיבור מערכת ה CPAP לחמצן :

מערכת ה CPAP שהוכנסה לאמבולנסים עובדת רק כאשר היא מחוברת למחבר/יציאת לחץ (DSS) .

1. יציאת לחץ – ההברגה הנמצאת על ווסתי החמצן (גדול וקטן) לפני בורר החמצן.
2. מחבר לחץ הדומה למחבר איתו מחברים את המנשם למערכת החמצן – מצורפות תמונות.

שימו לב, חיבור המערכת (גם אם ההברגה מתאימה) לבורר החמצן לא מספק את הלחץ הדרוש והמערכת

לא תעבוד!!



מיון ברזילי:

- א. יש להודיע על כל הבאת חולה המטופל ב CPAP מבעוד מועד ולהכניסו לחדר ההלם.
- ב. לחדר ההלם של בית החולים ברזילי הוכנסו 2 מתאמים ע"מ לחבר את ה CPAP לחמצן ביה"ח.

מספרי הטלפון הישיר להודעה במיון ברזילי : 086714087 , VPN -95100

מיון סורוקה:

מחברי DSS משולטים נמצאים במיון הפנימי במגירה (משולטת גם היא) בארון התרופות שבעמדת האחיות.

☒ בעקבות שאלות שעלו אבקש להבהיר: ערכת CPAP תמצא גם בצידוד העולה לבית

החולה והטיפול יחל כבר בבית!!!

שפיר בוטנר
מפקח אגף הרפואה
במרחבים נגב ולכיש
Shafirb@mda.org.il