




13.08.2018	מתאריך:	הוראות הפעלה – מדריך מקוצר
		אגף רפואה
	דף 1 מתוך 2	מדריך מקוצר להפעלת דפיברילטור LIFEPAK CR PLUS

הנחיות בדיקת תקינות המכשיר:

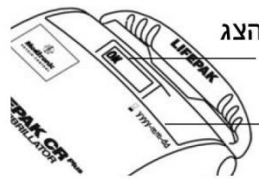

1. וודא כי על גבי הצג מופיע **OK**
2. וודא בחלונית כי המדבקות בתוקף

אין לפתוח את המכשיר לצורך בדיקה!!



MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL

מגן דוד
אדום
בישראל

לאחר חיבור המכשיר
לחולה יש להחליף
סוללה ומדבקות

ארגון ההצלה הלאומי





13.08.2018	מתאריך:	הוראות הפעלה – מדריך מקוצר
		אגף רפואה
	דף 2 מתוך 2	מדריך מקוצר להפעלת דפיברילטור LIFEPAK CR PLUS

בדיקת תקינות מכשיר (תבוצע בתחילת כל משמרת)

- יש לוודא כי מופיע החיווי "OK" במסך שממוקם במרכז חלקו העליון של המכשיר (ראה וי תמונה בדף הקודם) – במידה ולא, יש להעביר את המכשיר לגורם המטפל במרחב.
- יש לבדוק את תוקף המדבקות – מופיע בחלונית האליפטית בחלקו העליון של המכשיר מימין.
- בשום מקרה אין לפתוח את המכשיר לצורך בדיקה – פתיחת המכשיר תבוצע רק בזמן חיבור למטופל.

מידע כללי

- לאחר כל שימוש יש להחליף את הסוללה והמדבקות.
- המדבקות שמגיעות עם המכשיר מיועדות לשימוש במבוגרים (מעל 25 ק"ג). עם זאת, ניתן להשתמש במדבקות בהחייאת ילד במנח חזה גב.

אופן השימוש בדפיברילטור:

- חשוף את חזהו של המטופל.
- בצע עיסויים, בקצב ובעומק מתאים.
- עם הבאת הדפיברילטור יש לחברו למטופל מבלי להפריע לרצף העיסויים.
- לחץ על לחצן ההדלקה והכיבוי (ON/OFF) – המכסה יפתח והדפיברילטור ינחה על ביצוע הפעולות המתאימות. (במידה והדפיברילטור לא נדלק או שהמכסה חסר ניתן להפעיל את המכשיר ע"י לחיצה על לחצן ההדלקה/כיבוי).
- משוך את הידית האדומה כדי לחשוף את מדבקות האלקטרודות.
- הצמד את המדבקות לחזה המטופל כפי שמוצג באיור שעל המדבקות וודא שהן ממוקמות במרחק של 2.5 ס"מ לפחות זו מזו.
- במידה ולא ניתן לשמור על מרווח בין המדבקות (בתינוקות לדוגמא) ניתן להדביק את המדבקות על החזה ועל הגב (ראה איור).
- האזן להנחיות ואל תגע במטופל אלא אם כן ניתנה הוראה לכך.
- אם ניתוח קצב הלב של המטופל קבע שיש לתת שוק תושמע הנחיה להתרחק ולחצן השוק (SHOCK) יהבהב – לחץ על הלחצן כדי לתת שוק.
- מיד לאחר השוק יש להתחיל לבצע עיסויים.

