

## הוראות תפעול למכשיר מוניטור 6500HS

1. ע"פ הנחיות אגף הרפואה, טרם כניסה ומגע עם החולה יש להתמגן במיגון מלא.
2. וודא בעדינות כי כל האביזרים מחוברים למכשיר.
3. הפעל את המכשיר על ידי לחיצה על הכפתור הכתום המופיע בפינה הימנית התחתונה.
4. יש לוודא כי חיווי 4G (בסרגל התחתון של המסך) נמצא על "ON". במידה ונמצא על "OFF" – יש לשנות ידנית באמצעות מקשי החיצים שמתחת לסרגל.
5. הנח את שרוול מדידת לחץ הדם על ידו של המטופל כאשר הצינור מונח במרכז העורק הברכיאלי.
6. לחץ על כפתור ההפעלה של מדידת לחץ הדם.
7. לאחר מדידה ראשונית, המכשיר ידגום אוטומטית את לחץ הדם כל 10 דקות.
8. הנח את חישן הסטורציה על ידו השנייה של המטופל, ולא על היד בה נמדד לחץ הדם.
9. הדבק את מדבקות המוניטור על ארבעת גפיו של המטופל (LL, RL, LA, RA). במידה וקיימת מדבקה חמישית חומה – אין צורך בהדבקתה).
10. לאחר ההגעה ליעד יש לכבות את המכשיר ע"י לחיצה ארוכה על הכפתור הכתום.
11. יש לחטא את המכשיר עם הכבלים במגבונים לחים.
12. לאחר הנסיעה יש להטעין את המכשיר באמצעות חיבור לחשמל (זמני) בתחנה.
13. יש לכבות את המכשיר בין חולה לחולה.
14. יש להניח את המכשיר בתיק בעדינות בצורה אופקית.



- 1 - חיבור האביזרים
- 2 - כפתור כיבוי/הדלקה
- 3 - כפתור 4G
- 4 - מדידת לחץ דם
- 5 - שקע הטענה